

Gebrauchsanweisung Toilettensitzerhöhung „TSE“



Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer, wir gratulieren Ihnen zum Kauf eines technisch ausgereiften und nach dem neusten Stand der Technik konstruierten Produktes unseres Hauses. Bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung geht von der Benutzung der Toilettensitzerhöhung keine Gefahr aus. Die Gebrauchsanweisung beschreibt die Vorbereitung, Bedienung, Nutzung, Wartung und Pflege des Produktes. Sie dient somit dem Benutzer sowie dem Betreuungspersonal als Handlungsgrundlage für sichere und gefahrlose Nutzung Ihrer Toilettensitzerhöhung. Um die Nutzung sinnvoll auszuschöpfen und gefährliche Situationen zu vermeiden, lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.

Lieferumfang

Die Toilettensitzerhöhung wird montiert in einem Karton geliefert. Prüfen Sie den Inhalt zuerst auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

- Verpackungs- und Transportkarton
- Toilettensitzerhöhung
- diese Gebrauchsanweisung
- 2 Armlehnen

Zweckbestimmung

Die Toilettensitzerhöhung dient dem Benutzer als WC-Beckenranderrhöhung. Durch Befestigungsschrauben an der Unterseite kann die Toilettensitzerhöhung auf dem WC-Becken fixiert werden. Die Höhenverstellung und die hochklappbaren Armlehnen erleichtern das Umsetzen vom Rollstuhl auf die Toilette.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch die Bedienungsanleitung vollständig durch. Vergewissern Sie sich vor jeder Anwendung, dass ihre Toilettensitzerhöhung unversehrt ist.

- Achten Sie vor jeder Benutzung auf einen festen Sitz der Befestigungsschrauben.
- Die maximale Belastung bezieht sich nicht auf den Deckel.
- Der Deckel ist nicht zum Sitzen geeignet.
- Die Toilettensitzerhöhung ist nicht zum Dauersitzen geeignet.
- Achtung beim Herunterklappen der Armlehnen können Kleidungs- oder Körperteile eingeklemmt werden.
- Fehlende, beschädigte oder verschlissene Teile dürfen nur durch einen Fachhändler ersetzt werden.
- Verwenden Sie keine Hochdruckreinigungsgeräte oder scharfe, ätzende Chemikalien zur Reinigung.

Produktbeschreibung



Indikation

Die Verwendung der Toilettensitzerhöhung ist angezeigt bei Personen mit eingeschränkter Fähigkeit des Hinsetzens und Aufstehens
Bei Patienten mit fehlender Rumpfkontrolle
Personen mit Gleichgewichtsstörung
Personen mit erheblichen Funktionsausfällen an den unteren Extremitäten
Deutlich eingeschränkte oder vollständig aufgehobene Beweglichkeit der Lendenwirbelsäule, Hüft- und Kniegelenke

Kontraindikation

Die Verwendung der Toilettensitzerhöhung ist nicht angezeigt bei

- Wahrnehmungsstörungen
- starken Gleichgewichtsstörungen



Montage der Armlehnen

Stecken Sie das Rohr der Armlehne in die Öffnung am Sitzkorpus wie auf der Abbildung dargestellt
Drücken Sie den Federknopf am Rahmen der Armlehne hinein
Schieben Sie die Armlehne vollständig hinein, bis der Federknopf hörbar einrastet
Gehen Sie auf der anderen Seite genauso vor.
Zur Demontage gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.
Achtung! Es besteht Klemmgefahr.



Höheneinstellung

Lösen Sie die Lochabdeckungen ①
Schrauben Sie die Schraubknöpfe der Tragestange heraus ②
Ziehen Sie die Tragestange vollständig aus der Führung
Bringen Sie die Tragestange in die gewünschte Position
Schrauben Sie die Schraubknöpfe wieder vollständig fest
Bringen Sie die Tragestange an der Vorderseite des Sitzkorpus auf die gleiche Art und Weise auf die gleiche Höhe ③



Armlehnen auf dem Toilettenbecken

Die Armlehnen können zum vereinfachten ein- und aussteigen nach oben geklappt werden. Vergewissern Sie sich, dass beim Zurückklappen die Armlehnen in die Haltevorrichtung einrasten.



Montage auf dem Toilettenbecken

Der Abstand der Toilette bis zur rückseitigen Wand muss größer 20 cm sein. Sonst können die Armlehnen nicht zurückgeklappt werden.

Entfernen Sie die vorhandene Toilettenbrille. Schrauben Sie die Kunststoffmuttern (siehe Pfeile) von den Gewindestangen ab. Stecken Sie die Gewindestangen durch die Bohrung an der Toilettenschüssel. Ziehen Sie die Kunststoffmuttern wieder fest an.

Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben wieder fest angezogen sind.



Reinigung und Desinfektion

Die Toilettensitzerhöhung kann mit milden Reinigungsmitteln gereinigt werden. Zur Desinfektion verwenden Sie ein handelsübliches Flächendesinfektionsmittel.

Technische Daten

Toilettensitzerhöhung	TSE
Max. Belastbarkeit (kg)	130
Gewicht (kg)	5
Breite (cm)	60
Tiefe (cm)	50
Höhe (cm)	37
Sitzbreite (cm)	38
Armlehnenhöhe (cm)	21,5
Sitzerhöhung (cm)	8, 12, 16
Farbe	weiß
Material	ABS, Aluminium

Wartung

Die Toilettensitzerhöhung ist wartungsfrei konzipiert. Sollte die Toilettensitzerhöhung defekt sein, wenden Sie sich zum Austausch des Produktes an den Fachhändler.

Garantie

Die Gewährleistung entspricht den gesetzlich vorgeschriebenen 24 Monaten ab Kaufdatum. Garantieleistungen beinhalten Mängel des Produktes, die nachweislich auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Ausgeschlossen aus der Gewährleistungspflicht sind Beschädigungen, die durch natürlichen Verschleiß, durch Vorsatz, fahrlässige bzw. unsachgemäße Bedienung oder Benutzung entstanden sind. Die Garantie entfällt außerdem bei Verwendung von ungeeigneten Reinigungsmitteln.

TRENDMOBIL GmbH

Fohling 24

33106 Paderborn

Deutschland

Telefon.: +49 (0) 5254-9479-0

Telefax: +49 (0) 5254-9479-499

E-Mail: info@trendmobil.com

Internet: www.trendmobil.com



Leben in Bewegung



Ihr Fachhändler: